



NITRAZIN INDIKÁTOR PAPÍR

AD.5.



5,4 - 7,4 közötti pH ÉRTÉK KIMUTATÁSÁHOZ

Katalógus szám: 7201

Kiszerezés: 99 csfk/doboz


A papírcsikra felvitt indikátor színe a hidrogénion koncentráció függvényében változik.

FELHASZNÁLÁS

Folyadékok pH értéke, 0,3 pontossággal, szín változással kimutatható.

ELJÁRÁS

- Tépjük le egyet az indikátorpapírból és merítsük a folyadékba.
- 2 percen belül hasonlítsuk össze az indikátor zóna színét a dobozon elhelyezett pH-színskálával és olvassuk le az értéket, majd jegyezzük fel. (ábra)

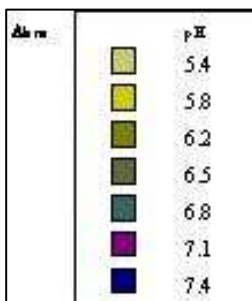

MEGJEGYZÉSEK

- Csak a szükséges mennyiségű csíkot tépjük le és azonnal használjuk fel.

TÁROLÁS: SZÁRAZ, SAVAS ÉS AMMÓNIA GŐZÖKTŐL MENTES HELYEN, ZÁRVA TAROLJUK.

	Használati utasítás
	IN VITRO használat
	Tárolási hőmérséklet

Csomagoláson feltüntetett jelölések

	Csomagolási szám		Gyártó cég
	Használhatóság ideje		Csak egyszeri használatra
	Gyári szám		Katalógus szám

Megrendelhető: **VITANI Kft.**
1147 Budapest, Telepes u. 17.
Telefon: 467-0767, Fax/Üzenetrögzítő: 467-0769
E-mail: vitani.kft@vitani.hu, Honlap: www.vitani.hu
Webáruház: <http://webshop.vitani.hu>

Gyártó: Kallies Feinchemie GmbH, Sebnitz
Ellenőrizve: 2012.08.15.
Verzió: 2/1/2012