



NITRAZIN INDIKÁTOR PAPÍR

AD.5.



VIZELET PH ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Katalógus szám: 7201

Kiszerezés: 99 csík/doboz

A papírcsíkra felvitt indikátor színe a hidrogénion koncentráció függvényében változik.

FELHASZNÁLÁS

Gyors és egyszerű módszer a húgysavkövek terápiás kezelésének önellenőrzésére.

ELJÁRÁS

- Tépjük le egyet az indikátorpapírból és mérjük a vizeletbe.
- 2 percen belül hasonlítsuk össze az indikátor zóna színét a dobozon elhelyezett pH-színskálával és olvassuk le az értéket, majd jegyezzük fel. (ábra)

Ábra	pH	Adagolás
	5.4	adagot növelni kell
	5.8	
	6.2	az adag megfelelő
	6.5	
	6.8	az adagot csökkenteni kell
	7.1	
	7.4	

MEGJEGYZÉSEK

- A vizelet kémhatásának ellenőrzése mindig az újabb gyógyszerbevétel előtt történjen.
- A szükséges mennyiségű csíkot tépjük le és azonnal használjuk fel.
- Friss vizeletet használjunk a mérésre!
- Ha tartósan **pH = 6.2** a vizelet kémhatása, csak akkor kell emelni a gyógyszeradagot, különben ez az érték megfelelő.
- Cisztinkövek esetében a vizelet pH-értékét 6.8-7.1 értékre kell beállítani.
- Purinban gazdag ételek fogyasztását kerülni kell (halételek, belseőségek).
- Naponta 1.5-2.0 liter folyadékot célszerű fogyasztani.

TÁROLÁS: SAVAS ÉS AMMÓNIA GŐZÖKTŐL MENTES HELYEN, ZÁRVA TARTANDÓ.

Csomagoláson feltüntetett jelölések

	Használati utasítás		Csomagolási szám		Gyártó cég
	IN VITRO használat		Használhatóság ideje		Csak egyszeri használatra
	Tárolási hőmérséklet		Gyári szám		Katalógus szám

Megrendelhető: **VITANI Kft.**

1147 Budapest, Telepes u. 17.

Telefon: 467-0767, Fax/Üzenetrögzítő: 467-0769

E-mail: vitani.kft@vitani.hu

Gyártó: Kallies Feinchemie GmbH, Sebnitz

Ellenőrizve: 2009.03.20.

Verzió: 2/1/2009